





### Керівництво з використання

Нижчезазначеним керівництвом треба користуватися, враховуючи докладну інформацію зазначену на упаковці.

Найменування	nitrylex® PF
Графічний знак	
Скорочений опис виробу	оглядові нітрилові рукавички без пудри, нестерильні, для одноразового використання, 200 штук
Повний опис виробу	<ul style="list-style-type: none"><li>• вид рукавички: оглядова, захисна, нестерильна</li><li>• сировина: нітрil</li><li>• засіб для присипки: відсутній</li><li>• кількість в одиничній упаковці: 200 штук</li><li>• поверхня: з текстурою на закінченнях пальців</li><li>• обробка манжети: рівномірно загорнутий край (валик)</li><li>• форма: універсальна, підходить на ліву та праву руку</li><li>• розміри: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)</li><li>• довжина менше 270 мм, <math>240 \pm 5</math> мм, вид - рукавички придатні для спеціального призначення, це також рукавички оглядові та захисні</li><li>• AQL: <math>\leq 1,5</math></li><li>• вміст протеїнів: відсутні</li></ul>
Властивості / Застосування	<ul style="list-style-type: none"><li>• Це одноразові оглядові та захисні рукавички загального застосування в охороні здоров'я.</li><li>• Призначені для лікарських, діагностичних оглядів, терапевтичних процедур і для роботи із септичним матеріалом, теж спроектовані як засіб індивідуального захисту простої конструкції, здатні захищати від невеликих погроз, які не можуть викликати невідворотних ушкоджень шкіри користувача. Проект та маркування виконує вимоги Директиви 93/42/ЄЕС з питання медичного обладнання та Директиви 89/686/ЄЕС на засоби індивідуального захисту, з їхніми пізнішими змінами.</li><li>• Дані рукавички відповідають вимогам стандартів EN 455-1 та EN 455-2.</li><li>• Треба звернути увагу на факт, що підтверджений рівень захисту не зображує справжніх умов роботи, де інші фактори можуть впливати на ефективність захисту.</li><li>• Слід подбати про те, щоб рукавички були використані виключно відповідно до свого</li></ul>

	призначення.
<b>Контакт з продуктами харчування</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рукавички, позначені піктограмою, яка позначає контакт з продуктами харчування,  також ж відповідають вимогам Регламенту № 1935/2004 Європейської Ради та вимоги Стандарту GMP (Належна виробнича практика).</li> <li>не всі рукавички, придатні для контакту з продуктами харчування, можуть використовуватися з будь-яким видом продуктів харчування; деякі рукавички можуть випускати занадто багато речовин у деякі види продуктів харчування. Для отримання інформації про наявні обмеження, а також про те, з якими конкретно видами продуктів харчування можливо використовувати рукавички, треба звертатися в компанію Mercator Medical</li> </ul>
<b>Зберігання</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>рекомендується зберігати рукавички в сухому місці, при температурі 5-30 ° C і захищати від впливу сонячного і флуоресцентного світла</li> <li>рекомендована відносна вологість повітря в приміщенні, де зберігаються рукавички це 60 ± 20%</li> <li>зберігати рукавички не ближче 1м від нагрівальних приладів, джерел вогню й озону</li> <li>не зберігати при безпосередньому сусідству з розчинниками, маслами, паливами, мастильними засобами</li> </ul>
<b>Очищення</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>одноразові рукавички, очищенню не підлягають</li> </ul>
<b>Запобіжні заходи при використанні і показання</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>під час використання рукавичок треба застосовувати делікатні мийні та дезінфекційні засоби, які не подразнюють шкіру рук</li> <li>перед надяганням рукавичок, рекомендується ретельно висушити шкіру рук</li> <li>після кожного зняття рукавичок рекомендується ретельно помити руки, осушити їх і застосовувати крем для рук</li> <li>слід використовувати мін. 1 пару рукавичок для одного пацієнта й однієї процедури - одноразові рукавички</li> <li>рукавички, забруднені кров'ю або біологічними рідинами, повинні бути вилучені як медичні відходи</li> <li>якщо хімічна речовина потрапить на шкіру, слід її негайно промити великим обсягом води з добавкою мила</li> <li>треба берегтися, щоб хімічні речовини не</li> </ul>

	<p>потрапляли в середину рукавичок через манжету</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• перед використанням слід перевірити, чи не мають рукавички дефектів або інших недоліків</li> <li>• під час використання, у разі виявлення проколу, тріщини, розриву слід негайно замінити рукавички</li> <li>• уникати використання рукавичок, забруднених всередині, - вони можуть викликати подразнення, які призводять до запалення шкіри або до більш серйозних травм</li> <li>• рукавички не можна використовувати в контакт з відкритим вогнем або для захисту від будь-яких гострих інструментів</li> <li>• рукавички непридатні для зварювальних робіт, для захисту від ураження електричним струмом, від іонізуючого випромінювання, від впливу холодних або гарячих предметів</li> </ul>
<b>Компоненти / небезпечні компоненти</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Деякі рукавички можуть містити компоненти, про які відомо, що вони можуть стати потенційною причиною алергічної реакції в осіб, у яких алергія до них, у них можуть розвиватися контактні подразнення та / або алергічна реакція</li> <li>• рукавички з натурального каучукового латексу - можуть спричиняти алергізуючі дії, включаючи анафілактичні реакції</li> <li>• у разі виникнення алергічної реакції слід терміново звернутися за медичною допомогою</li> </ul>
<b>Піктограми використані на упаковці, але не описані в узгоджених стандартах</b>	<div>  <p>рукавички без пудри</p> </div> <div>  <p>нітрилові рукавички</p> </div> <div>  <p>200 шт. рукавичок за вагою</p> </div>
<b>Утилізація</b>	<p>Використані рукавички можуть бути забруднені заразними або іншими небезпечними речовинами. Треба їх утилізувати згідно з чинним місцевим законодавством. Закопування або спалювання рукавичок слід проводити в контрольованих умовах.</p>
<b>Відповідальний суб'єкт</b>	<p><b>Mercator Medical S.A./AT</b>  <b>Ul./Вул. H. Modrzejewskiej / Х. Моджеєвскєй 30</b>  <b>31-327 Kraków/ Краків</b>  <b>www.mercatormedical.eu</b></p>

